


Actimove[®]

Cervical

Halskraag –
stevige densiteit

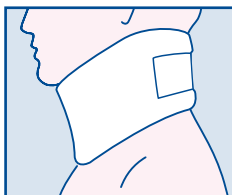

Geachte klant,

Hartelijk dank voor het kiezen van Actimove® Cervical.

Actimove® Cervical is een voorgevormde halskraag met een anatomische pasvorm en circulaire ondersteuning van de wervelkolom ter hoogte van de nek. De kraag is eenvoudig in het gebruik door de klittenbandsluiting. De wasbare hoes is verwijderbaar waardoor de kraag eenvoudiger schoon te houden is. Actimove® Cervical is verkrijgbaar in een gemiddelde en hoge densiteit voor een gemiddelde of sterke nekondersteuning en is een gemakkelijke behandelingsoplossing voor diverse acute en chronische nekklachten.

Volg de instructies hieronder nauwlettend op.

Indicaties:

Actimove® Cervical (hoge densiteit) is geïndiceerd voor postoperatief gebruik, verdraaiingen (verstuikingen), overbelasting en kortstondig gebruik na whiplashletsel. Het product wordt ook aanbevolen voor lichte cervicale artros, pijnlijk acuut en chronisch cervicaal syndroom, spondylarthrosis deformans (een degeneratieve aandoening van de wervelkolom), musculaire pijnsyndroom, osteochondrose (een degeneratieve aandoening van de tussenwervelschijven en wervellichamen) en cervicale migraine.

Contra-indicaties:

Gebruik Actimove® Cervical niet als u lijdt aan ernstig nekletsel zoals fracturen van de halswervels.

Toepassing:

Wij adviseren de Actimove® Cervical de eerste keer door een behandelaar of een opgeleide specialist te laten aanbrengen, zodat u verzekerd bent van een optimale pasvorm en therapeutische ondersteuning.

1. Trek de wasbare hoes over de kraag. Zorg ervoor dat het oppervlak glad en kreukvrij is.
2. Plaats de kraag op de juiste wijze, met de uitsnijding onder uw kin.
3. Wikkel de uiteinden rond uw nek en sluit het klittenband aan de achterzijde.


Reiniging & verzorging:

Actimove® Cervical kan met de hand of in de machine worden gewassen (programma voor fijne was op 30 °C). Sluit het klittenband voordat u het product wast. Voor uw Actimove® Cervical geldt: geen bleekmiddel gebruiken, niet chemisch reinigen, niet in de droogtrommel drogen en niet strijken. Voor het dragen geheel laten drogen. Let op: de hoes is verwijderbaar, zodat u deze frequenter kunt wassen voor meer hygiëne.


Voorzorgsmaatregelen:

U dient de behandelingsadviezen van uw arts op te volgen. Let erop dat u Actimove® Cervical niet te strak aantrekt zodat uw ademhaling niet wordt belemmerd. Mocht u tijdens het dragen enig ongemak, een doof gevoel, veranderingen in uw huidskleur of zwelling ervaren, stop dan met het gebruik van de halskraag en neem contact op met uw behandelend arts.


1

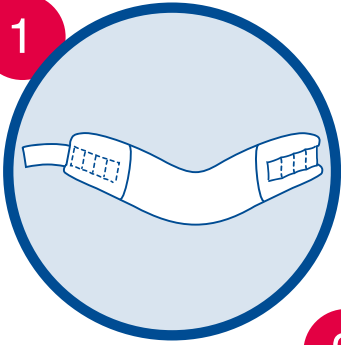

2

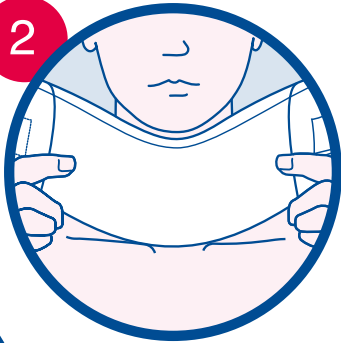

3

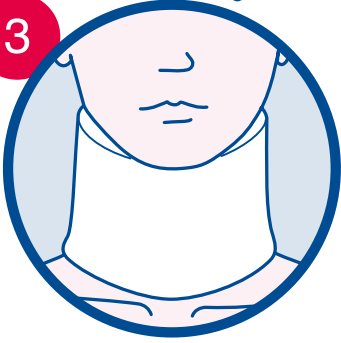

Actimove[®]

Cervical

50% Polyester
42% Ethylene-vinyl acetate
8% Polyamide

.....



Manufactured for:
BSN medical Inc.
100 Beiersdorf Drive
Rutherford College, NC 28671 · USA

 BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
20253 Hamburg · Germany
www.bsnmedical.com

Made in China

JBR05430.02 03/2012