


Actimove[®]

Gauntlet

Duim & Pols Brace

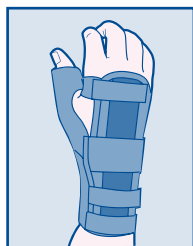

Geachte klant,

Hartelijk dank voor het kiezen van Actimove® Gauntlet.

Actimove® Gauntlet is een stabiliserende pols- en duimorthese voor de behandeling van pijnklachten en irritatie van de pols- en duimgewrichten, verband houdend met chronische of acute aandoeningen. Twee voorgevormde aluminium baleinen zorgen voor een sterke stabilisatie en ondersteuning. De zachte duimhuls van neopreen en het lichtgewicht elastische materiaal zorgen voor een groot draagcomfort en stevige pasvorm. Actimove® Gauntlet ondersteunt de pols en duim voor pijnverlichting, waarbij de vingers vrij kunnen bewegen.

Volg de instructies hieronder nauwlettend op.

Indicaties:

Actimove® Gauntlet is geïndiceerd voor pijnlijke artrose en reumatoïde artritis van de pols, voor postoperatief gebruik, bij tendovaginitis (ontsteking van de peesschede), na letsel aan pezen, letsel aan ligamenten en zachte weefsel, en bij verdraaiingen (verstuikingen). Gebruik wordt ook aanbevolen bij postoperatieve en posttraumatische irritatie, carpaal tunnel syndroom (CTS) en een skiduim.

Contra-indicaties:

Gebruik Actimove® Gauntlet niet voor de directe behandeling van fracturen of als u lijdt aan stoornissen in de lymfedoorstroming of bloedsomloop in handen en vingers.

Gebruik Actimove® Gauntlet niet als u weet dat u gevoelig bent voor latex of producten die latex bevatten.

Toepassing:

Wij adviseren de Actimove® Gauntlet de eerste keer door een behandelaar of een opgeleide specialist te laten aanbrengen, zodat u verzekerd bent van een optimale pasvorm en therapeutische ondersteuning.

1. Plaats uw hand in de geopende orthese en zorg dat de hand gepositioneerd is in overeenstemming met de anatomische vorm van de palmbalein.
2. Wikkel het buitenste deel van de orthese over de pols en bevestig de brede middelste band met gemiddelde spanning.
3. Sluit de twee overige polsbanden en bevestig ten slotte de palmband.
4. Wikkel de haaksluiting rond de duim, met gemiddelde spanning.
5. Zorg dat de orthese comfortabel zit, waarbij u uw vingers vrij kunt bewegen. Voor afzonderlijke aanpassingen verwijdt u de metalen baleinen en past u de vorm aan de anatomie van uw hand aan.

Reiniging & verzorging:

Actimove® Gauntlet kan met de hand of in de machine worden gewassen (programma voor fijne was op 30 °C/86 °F en een mild wasmiddel). Verwijder voor het wassen de twee metalen baleinen en sluit de banden. Voor de pols- en duimorthese geldt: geen bleekmiddel gebruiken, niet chemisch reinigen, niet in de droogtrommel drogen en niet strijken. Voor het dragen geheel laten drogen bij kamertemperatuur.

Voorzorgsmaatregelen:


U dient de behandelingsadviezen van uw arts op te volgen. Mocht u tijdens het dragen enig ongemak, een doof gevoel, veranderingen in uw huidskleur of zwelling ervaren, stop dan met het gebruik van Actimove® Gauntlet en neem contact op met uw behandelend arts.

Waarschuwing: Dit product bevat natuurlijk rubberlatex, hetgeen allergische reacties kan veroorzaken.


1




2

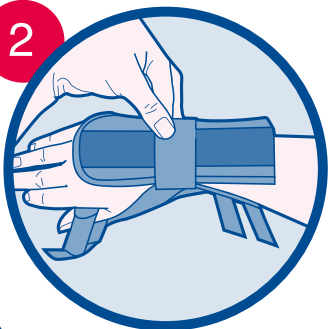

3

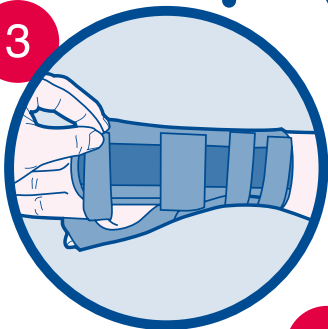

4

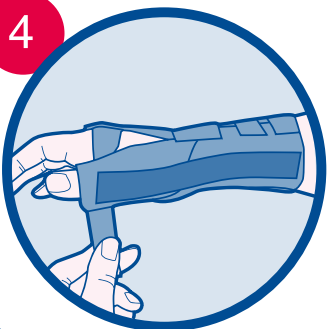

5



Actimove[®]

Gauntlet

60% Polyester
25% Polyamide
8% Elastodiene
5% Chloropren-Rubber
2% Elastane



Manufactured for:
BSN medical Inc.
100 Beiersdorf Drive
Rutherford College, NC 28671 · USA



BSN medical GmbH
D-22771 Hamburg · Germany
www.bsnmedical.com

Made in Taiwan ROC

JBR05569.02 11/2011