



UNicare®

MODE D'EMPLOI UNICARE®

Unicare, solution tout-en-un pour lentilles de contact rigides perméables à l'oxygène, est un produit bien équilibré stérilisé. Grâce à son effet décontaminant, la solution Unicare est un produit idéal pour le nettoyage, la conservation et la pose de lentilles de contact rigides perméables à l'oxygène. Unicare assure une sécurité optimale ainsi que la décontamination de vos lentilles de contact rigides perméables à l'oxygène. Unicare peut remplacer quasiment tout type de système d'entretien pour lentilles de contact rigides perméables à l'oxygène et convient en principe à tout type de lentilles de contact rigides perméables à l'oxygène.

NETTOYAGE

Se laver les mains (de préférence avec du savon décontaminant) et supprimer soigneusement tout résidu savonneux. Sécher les mains avec un tissu sec non pelucheux. Retirer la lentille de l'œil droit et la poser dans la paume de la main. Verser 5 à 10 gouttes de solution Unicare sur la lentille pour nettoyer avec soin chaque côté de la lentille avec l'index. Continuer le traitement pendant une trentaine de secondes. Prendre la lentille entre le pouce et l'index pour éliminer la solution superflue de la lentille en la secouant. Rincer ensuite la lentille avec Unicare.

Pour obtenir une décontamination optimale, répéter la procédure susmentionnée. Placer ensuite la lentille droite dans l'étui rempli de solution Unicare frais. Répéter la même procédure avec la lentille gauche.

DÉCONTAMINATION, CONSERVATION ET POSE

Conserver les lentilles dans l'étui à lentilles fermé. Pour obtenir une décontamination optimale, conserver les lentilles au moins pendant 6 heures dans l'étui à lentilles. Rafraîchir chaque jour la solution Unicare dans l'étui à lentilles. En cas de non-utilisation prolongée, conserver les lentilles dans Unicare. On peut poser les lentilles immédiatement après la décontamination.

△ N.B.

Pour poser et retirer les lentilles, suivre systématiquement le même ordre afin de ne pas les confondre. En cas de gêne persistante, cesser l'utilisation du produit et consulter un médecin ou un spécialiste de lentilles de contact. Après l'ouverture du flacon, jeter la solution résiduelle au bout de 90 jours. Conserver à une température ambiante (15 °C à 25 °C). Éviter tout contact avec l'ouverture du flacon. Respecter soigneusement la propreté de l'étui à lentilles. À conserver en dehors de la portée des enfants.

En cas de questions ou de remarques, envoyez un e-mail à info@melleson.nl

 Melleson Pharma
NL-4817 ZH 7384 Breda

CE 0344



GEBRUIKSAANWIJZING UNICARE®

Unicare contactlensvloeistof alles-in-een voor zuurstofdoorlatende harde contactlenzen is een uitgekende vloeistof, die gesteriliseerd is. Unicare vloeistof desinfecteert en is geschikt voor het schoonmaken, bewaren en inzetten van zuurstofdoorlatende harde contactlenzen. Unicare verzekert een optimale bescherming en desinfectie van uw zuurstofdoorlatende harde contactlenzen. Unicare kan vrijwel alle onderhoudssystemen voor zuurstofdoorlatende harde contactlenzen vervangen en is geschikt voor in principe alle soorten zuurstofdoorlatende harde contactlenzen.

REINIGEN

Was uw handen (bij voorkeur met een desinfecterende zeep) en zorg ervoor dat er geen zeepresten achterblijven. Droog uw handen af met een schone, niet pluizende doek. Verwijder uw rechter lens uit het oog en leg deze in uw handpalm. Giet nu 5-10 druppels Unicare op de lens en wrijf de lens aan beide kanten voorzichtig schoon met behulp van uw wijsvinger. Deze handeling voert u gedurende 30 seconden uit. Pak de lens tussen duim en wijsvinger en schud de overtollige vloeistof van de lens. Spoel de lens daarna af met Unicare.

Voor een optimale desinfectie dient u bovengenoemde handeling te herhalen. Plaats de lens vervolgens in de met verse Unicare gevulde lenshouder. Volg dezelfde procedure voor de linker lens.

DESINFECTEREN, BEWAREN EN INZETTEN

Uw lenzen bewaart u in een gesloten lenshouder. Voor een optimale desinfectie dienen de lenzen minimaal 6 uur in de lenshouder bewaard te blijven. De Unicare vloeistof in de lenshouder dient iedere dag verversd te worden. Wanneer de lenzen gedurende een langere periode niet gebruikt worden, dient u ze in de Unicare vloeistof te bewaren. Na desinfectie kunt u de lenzen direct inzetten.

⚠ BELANGRIJK

Houd altijd dezelfde volgorde aan bij het inzetten en verwijderen van de lenzen, om verwisseling te voorkomen. In geval van oogirritatie, staak het gebruik en raadpleeg een arts of een contactlensspecialist. Na opening niet langer dan 90 dagen gebruiken. Bij kamertemperatuur (15°C-25°C) bewaren. Raak de opening van de flacon niet aan. Houd de lenshouder goed schoon. Buiten bereik van kinderen houden.

Heeft u vragen of opmerkingen, stuur een e-mail naar info@melleson.nl

 Melleson Pharma
NL-4817 ZH 7384 Breda

06/2011

CE 0344

05REF0139