

**Flowflex™**

**Snelle test op SARS-CoV-2-antigeen**

**(Zelftest) Bijsluiter**


REF	L031-11855	Nederlands
REF	L031-118A5	
REF	L031-118Q5	

Een Antigeen sneltest voor de opsporing van SARS-CoV-2 in neusuitstrijkje specimens. Voor zelftesten gebruik.

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u de test uitvoert.

**VOORBEREIDING**

**KIT INHOUD**

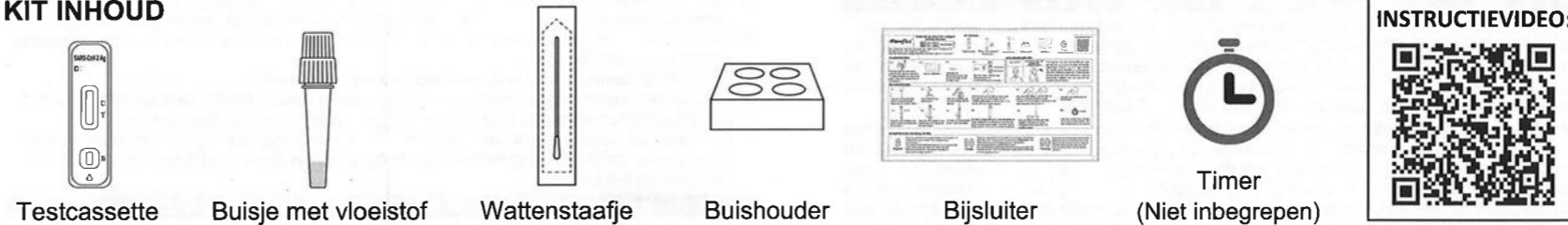

**1.** Snuit uw neus meerdere keren voordat u het monster neemt. Reinig uw handen, zorg dat ze droog zijn voordat u met de test begint.

**2.** Lees de instructies.

**3.** Controleer de houdbaarheidsdatum die op het foliezakje van de cassette staat.

**4.** Open het zakje. Controleer het Resultaatvenster en monsteropening op de cassette.

**MONSTERNAME**

**ZELF AFNAME** Een monster van een neusuitstrijkje kan door een persoon van 18 jaar en ouder zelf worden afgenomen. Kinderen van 12-17 jaar moeten de uitstrijk onder toezicht van volwassenen uitvoeren. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten worden getest door een volwassene. Volg uw plaatselijke richtlijnen voor het afnemen van monster voor kinderen.

**COLLECTIE DOOR EEN VOLWASSENE EN / OF ZORGVRELENER**

**TESTPROCEDURE**

**1.** Schroef het druppeldopje van de extractie-bufferbuisje los.

**2.** Plaats de buis in de buishouder.

**3.** Open de verpakking van het wattenstaafje aan het uiteinde.

**4.** Plaats de punt van het wattenstaafje in één neusgat. Duw het wattenstaafje met een zachte draaibeweging op minder dan 2,5 cm van de rand van de neusvleugel.

**5.** Draai het wattenstaafje 5 keer en strijk het tegen de binnenkant van het neusgat. Verwijder het wattenstaafje en plaats het in het andere neusgat. Herhaal stap 4.

**6.** Verwijder een wattenstaafje uit het neusgat.

**7.** Breng het wattenstaafje in het buisje en draai rond gedurende 30 seconden.

**8.** Draai het wattenstaafje 5 keer rond terwijl u in de zijkant van het buisje knijpt.

**9.** Verwijder het wattenstaafje terwijl u in de buis knijpt.

**10.** Schroef de druppeldop op het buisje. Meng grondig door te links en rechts te schudden of door tegen de bodem van het buisje te tikken. **NIET OP EN NEER SCHUDDEN, want dat veroorzaakt luchtballen.**

**11.** Draai het buisje om. Knijp zachtjes in het buisje en doseer **4 druppels** van de oplossing in de monsteropening aangeduid met een S.

**12.** Lees het resultaat af als de timer 15-30 minuten heeft bereikt. Lees het resultaat niet af na 30 minuten.

**INTERPRETATIE VAN RESULTATEN**

**Negatief** Alleen de controlelijn (C) en geen testlijn (T) verschijnen. Dit betekent dat er geen SARS-COV-2-antigeen werd gedetecteerd. Een negatief testresultaat geeft aan dat het onwaarschijnlijk is dat u momenteel de ziekte van COVID-19 heeft. Raadpleeg uw arts als u symptomen ontwikkelt of symptomen ernstiger worden.

**Positief** Zowel de controlelijn (C) als de testlijn (T) verschijnen. Dit betekent dat SARS-COV-2-antigeen werd gedetecteerd. **OPMERKING: Elke lichte verkleuring van het testlijngedebied (T) moet worden geïnterpreteerd als een positief testresultaat.** Een positief testresultaat betekent dat het zeer waarschijnlijk is dat u momenteel de COVID-19 ziekte heeft. Isoleer uzelf en raadpleeg zo snel mogelijk uw arts.

**Ongeldig** Controlelijn (C) niet zichtbaar. Onvoldoende aantal specimen of onjuiste werking zijn de waarschijnlijke redenen voor een ongeldig resultaat. Neem de instructies nogmaals door en herhaal de test met een nieuwe cassette.