

UNIPHARMA WRATTENTINCTUUR

Wratbehandeling.

Voor kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen.

Slechts 1 keer per week aanstippen

Algemeen advies: Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u Unipharma Wrattentinctuur gaat gebruiken, óók als u dit medisch hulpmiddel al eerder heeft gebruikt. De informatie kan zijn aangepast aan de laatste inzichten en gegevens wanneer u aan een nieuwe verpakking begint. Dit medisch hulpmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Unipharma Wrattentinctuur zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.

Toepassing: Unipharma Wrattentinctuur is een medisch hulpmiddel voor de behandeling van gewone wratten. Het bevat monochloorazijnzuur, een stof die een afbrekende werking heeft op de huid. De wrat zal laagje voor laagje loslaten. Monochloorazijnzuur zorgt er voor dat de cellen die het wrattenvirus bevatten verdwijnen.

WRAT WEG ENKEL TE GEBRUIKEN BIJ:

Gewone wrat (verruca vulgaris)

- Komen voornamelijk voor op handen en voeten;
- Zelfde kleur als de huid;
- Grootte varieert van 1 mm tot 1 cm;
- Vaak meerdere tegelijk;
- Besmetting gebeurt vaak via direct contact, maar ook via een handdoek of deurskruk;
- Krabben en nagelbijten vergroten de kans op besmetting.



WRAT WEG NIET TE GEBRUIKEN BIJ:

Ouderdomswrat (Verruca seborrhoica)

- Hebben verschillende vormen en kleuren;
- De gemiddelde grootte is 0.5 cm tot 1 cm, maar kan ook groter worden;
- In het begin vaak een ruw oppervlak die huidkleurig / geelbruin / grijsbruin is. Later worden ze dikker en groter, met een wratachtig, donkergekleurd oppervlak;
- Lijkt alsof ze bovenop de huid zitten en makkelijk los te krabben zijn, maar ze zitten stevig vast op de huid;
- Ze kunnen overal op het lichaam voorkomen, behalve op de handpalmen, voetzolen en lippen. Ze komen het vaakst voor op de borst, de rug, het gelaat en/of de nek.



De voordelen: Een voordeel van het gebruik van Unipharma Wrattentinctuur is dat het 1x aanstippen van de wrat geen pijn doet en het dus ook voor kinderen gebruikt kan worden (mits correct aangebracht door een volwassene);

- Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar;
- Voor de behandeling van gewone wratten op handen en voeten;
- Slechts 1 behandeling per week;
- Pijnloos aanstippen*;
- Gemakkelijk en eenvoudig te gebruiken.

*Mits correct aangebracht.



Gebruiksaanwijzing: Voorkom brandwonden:

DOEN:

- Alleen te gebruiken op handen en voeten! Niet op andere lichaamsdelen;
- Smeer eerst de omliggende huid goed in met Vaseline of Zinkzalf om de huid goed te beschermen;
- Plaats het flesje op een stevige, horizontale ondergrond die bestand is tegen de bijtende vloeistof;
- Maximaal 1 keer per week de wrat eenmalig aanstippen;
- De vloeistof alleen in aanraking laten komen met de wrat. Vermijd contact met de huid;
- Vloeistof volledig laten opdrogen na het aanbrengen;
- De wrat niet afdekken na het aanbrengen van Unipharma Wrattentinctuur;
- Resultaat is zichtbaar na 1 week;
- Buiten het gebruik van kinderen houden.



NIET DOEN:

- Aanbrengen op wratten op andere plekken dan handen en voeten;
- Aanbrengen op wratten die zich geheel of gedeeltelijk onder de nagel bevinden;
- In aanraking laten komen met de gezonde huid;
- Aanbrengen bij trillende handen of verstijfde vingers;
- Meerdere keren aanstippen tijdens het aanbrengen;
- Afdekken van de wrat na het aanbrengen van de vloeistof;
- Aanbrengen op moedervlekken, waterwratjes, open wonden, pigmentvlekken, wijnvlekken, ouderdom (bruine) wratten, donker gekleurde behaarde of vreemd uitzijnde wratten;
- Gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.



Unipharma Wrattentinctuur heeft een kind veilige sluiting, die u als volgt kunt openen: Plaats het flesje op een stevige ondergrond, die bestand is tegen de bijtende vloeistof. Vermijd contact met kleding, textiel of tafellakens. U kunt het flesje openen door de dop gelijktijdig in te drukken en te draaien. Verwijder vervolgens de dop van het flesje.

Om te voorkomen dat de huid rondom de wrat wordt aangetast, moet de omliggende huid voorafgaand aan de behandeling worden beschermt tegen de bijtende werking van de vloeistof met **Vaseline** of **Zinkzalf**.

Let erop dat u Unipharma Wrattentinctuur alleen op de wrat aanbrengt. Laat het vervolgens even drogen. De wrat mag niet afgedekt te worden. In een week tijd zal de wrat laagje voor laagje loslaten. De vloeistof heeft een week nodig om het bovenste laagje van de huid los te weken, u zult dus niet direct na het aanbrengen resultaat zien. Na enige tijd worden de wrattencellen vernietigd en zal de wrat een witte kleur krijgen en worden afgestoten. Unipharma Wrattentinctuur niet vaker aanbrengen dan 1 keer per week. Afhankelijk van de grootte en dikte van de wrat kan het noodzakelijk zijn om de behandeling met Unipharma Wrattentinctuur na een week te herhalen. Wratten zijn besmettelijk. Daarom wordt gebruik van het product door meerdere personen afgeraden.

Breng Unipharma Wrattentinctuur aan met de grootst mogelijke zorg. De oplossing is bijtend. Let goed op bij de toepassing op lichaamsdelen die moeilijker te bereiken zijn zoals voetzolen.

Dit geldt vooral bij personen met een beperkte mobiliteit of in geval van een gestoorde fijne motoriek (trillende handen, verstijfde vingers). Sluit het flesje goed af na gebruik.

Wij zijn er mee bekend dat Unipharma Wrattentinctuur verkeerd kan worden gebruikt. Om deze reden is het des te belangrijker om zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing door te lezen.

Ingrediënten: monochloorazijnzuur, gezuiverd water.

Inhoud: 2 ml flesje.

Unipharma Wrattentinctuur niet gebruiken:

- Bij overgevoeligheid voor één of meerdere bestanddelen;
- In het gezicht (de vloeistof mag in geen enkel geval in contact komen met de ogen of het slijmvlies van de neus of mond);
- Op genitale wratten of in het genitale gebied;
- Op moedervlekken, waterwrattjes, open wondjes, pigmentvlekken, wijnvlekken, ouderdom (bruine) wratten, donker gekleurde, behaarde of vreemd uitzijnde wratten;
- Op rode, geïrriteerde of geïnfecteerde wratten;
- Direct na een operatieve verwijdering van wratten, bevriezing van wratten (cryotherapie) of een laserbehandeling. Dit geldt in het bijzonder wanneer de huid rood of pijnlijk is na de behandeling. In dit geval dient u minimaal 4 weken te wachten totdat de roodheid of ontsteking van de huid volledig is verdwenen. Alleen dan kan gestart worden met Unipharma Wrattentinctuur;
- Tijdens zwangerschap of bij borstvoeding;
- Op wratten die zich geheel of gedeeltelijk onder de nagel bevinden.

Wees extra voorzichtig met het gebruik van Unipharma Wrattentinctuur:

- Bij twijfels over de diagnose (de huidverandering kan niet duidelijk verklaard worden als een wrat);
- In geval van immuundeficiëntie (bijvoorbeeld wanneer u cytostatische geneesmiddelen gebruikt);
- In geval van diabetes, of andere aandoeningen zoals vaatziekten, waardoor wondjes moeilijk genezen.

In deze gevallen mag Unipharma Wrattentinctuur niet gebruikt worden voordat een arts is geraadpleegd.



Waarschuwingen:

- Uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik;
- Heel voorzichtig gebruiken. De vloeistof van Unipharma Wrattentinctuur is bijtend;
- Als de gezonde huid in contact komt met Unipharma Wrattentinctuur, spoel deze dan af met water. Als er, ondanks deze voorzorgsmaatregel, huidirritatie ontstaat, dan dient de huid hetzelfde behandeld te worden als brandwonden;
- Neem contact op met de huisarts indien klachten aanhouden;
- Het flesje goed sluiten na gebruik en in staande positie wegzetten;
- Buiten bereik van kinderen bewaren;
- Gebruik door kinderen, ouderen en minder valide, altijd onder supervisie van een volwassene;
- Voorkom contact met de huid, kleding, textiel, tafelkleden;



**Let op !
Alleen geschikt
voor handen en
voeten**



- Stoppen indien blaren ontstaan;
- Wij adviseren om maximaal 2 wratten aan te stippen per behandeling.

Gebruik in combinatie met geneesmiddelen: Voor zover bekend zijn er geen wisselwerkingen met geneesmiddelen.

Mogelijke bijwerkingen: Unipharma Wrattentinctuur kan enkele bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De bijwerkingen die kunnen optreden bij gebruik van Unipharma Wrattentinctuur zijn: huidirritaties, branderigheid, roodheid van de huid of overgevoeligheidsreacties. Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze gebruiksaanwijzing is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.



Wijze van bewaren: Bij kamertemperatuur (5-25°C) op een droge, donkere plaats bewaren, in de originele verpakking, buiten het bereik van jonge kinderen.

Medisch hulpmiddel: Unipharma Wrattentinctuur is een medisch hulpmiddel klasse IIa, volgens de Europese richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEC.



Voor vervaldatum zie onderzijde van de verpakking. Unipharma Wrattentinctuur is na opening 1 maand houdbaar.

Datum waarop deze gebruiksaanwijzing voor het laatst is herzien: november 2019 - 030630-V2.6



PK Benelux BV
Vluchtoord 17
5406 XP Uden, NL

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen:

UniPharma,
Heertijkheidsweg 20,
4332 SN Middelburg
www.upvitamins.nl

CE 0481