



De expert tijdens de overgang

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u MenoRelax® gel voor het eerst gebruikt. Werp deze bijsluiter niet weg.

MenoRelax® Gel

- Vermindert vaginale droogheid
- Vochtinhoudend en lubricerend voor de vagina
- Langdurige werking
- Natuurlijk en effectief
- Geen hormonen, zonder oestrogeen
- Geen conserveermiddelen

Inhoud van deze bijsluiter

1. Waar wordt MenoRelax® gel voor gebruikt?
2. Wat zit er in MenoRelax® gel?
3. Wat u moet weten voordat u MenoRelax® gel gebruikt
4. Wanneer en hoe dient MenoRelax® gel gebruikt te worden?
5. Bewaren
6. Inhoud
7. Contactgegevens

1. Waar wordt MenoRelax® gel voor gebruikt?

MenoRelax® gel is een transparante gel zonder hormonen, die

- Vermindert vaginale droogheid
- Vochtinhoudend en lubricerend voor de vagina
- Onmiddellijke verlichting biedt, met een langdurig effect
- Geleverd wordt met een gebruiksvriendelijke applicator
- Natuurlijk en effectief is

Oestrogeen is een hormoon dat ervoor zorgt dat de vaginawand vochtig, dik en soepel blijft. Tijdens de overgang maakt het lichaam echter steeds minder en uiteindelijk helemaal geen oestrogeen meer aan. Dat kan een aantal gevolgen hebben:

- De menstruatie komt onregelmatig en stopt vervolgens
- Opvliegers

- Stemningswisselingen
- Vaginale droogheid

Als u MenoRelax® gel opneemt in uw dagelijkse persoonlijke verzorging, merkt u de positieve effecten meteen.

2. Wat zit er in MenoRelax® gel?

Eén tube MenoRelax® gel bevat 30 ml reukloze gel, zonder conserveermiddelen, hormonen, siliconen of bestanddelen van dierlijke oorsprong. De werkzame bestanddelen zijn hyaluronzuur, glycerine, betaïne, xanthaangom en pullulaan. Deze stoffen zijn vriendelijk voor het slijmvlies van de vagina. MenoRelax® gel is oplosbaar in water, is niet vet en laat geen vlekken achter.

3. Wat u moet weten voordat u MenoRelax® gel gebruikt.

MenoRelax® gel heeft voor zover bekend geen bijwerkingen en kan in combinatie met medicijnen worden gebruikt. Allergische reacties op een of meer van de bestanddelen zijn zeldzaam. Breng bij twijfel wat gel aan op de binnenkant van uw arm en laat dit enige tijd zitten. Als er een jeukende, rode plek verschijnt, raden wij u aan MenoRelax® gel niet te gebruiken.

4. Wanneer en hoe dient MenoRelax® gel gebruikt te worden?

Stop allereerst met het gebruik van zeep, lotions en geparfumeerde producten binnenin de vagina: dergelijke producten kunnen vaginale droogheid verergeren. Breng MenoRelax® gel met de applicator of met uw vinger aan (was uw handen van tevoren en na afloop). Het kan zijn dat u een licht tintelend gevoel krijgt. Dat is volstrekt normaal en het verdwijnt snel. Hoe vaak u MenoRelax® gel moet gebruiken, is afhankelijk van de mate van vaginale droogheid. Wij raden aan de gel om de drie dagen te gebruiken, of bij ernstige droogheid iedere dag.






De expert tijdens de overgang


Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u MenoRelax® gel voor het eerst gebruikt. Werp deze bijsluiter niet weg.

Wacht na een behandelperiode van maximaal 30 dagen steeds 2 dagen voordat u opnieuw begint. Verwijder eerst de dop van de tube en prik dan met de puntige bovenkant een opening in de afdichting van het tuitje van de tube. Als u wilt kunt u de speciale applicator gebruiken die ook in de doos zit. Draai hem op het tuitje nadat daar een opening in is geprikt en laat hem daar zitten. Was hem na gebruik met lauw water. Vergeet niet na gebruik de dop erop te draaien; gebruik de grote dop op het tuitje van de tube, of de kleine dop op de applicator.

Uitwendig gebruik

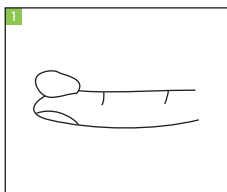


Knijp wat gel (1 ml, genoeg om een vingertop te bedekken) op uw wijsvinger

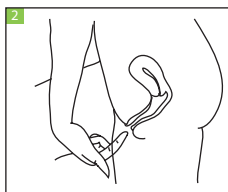


Breng de gel aan op en rondom de opening van de vagina

Inwendig gebruik

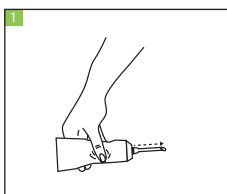

Knijp zachtjes in de tube tot er wat gel uit de bovenkant van de applicator komt

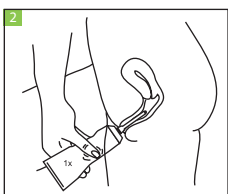

Breng de applicator in en knijp zachtjes – de benodigde hoeveelheid gel (1 ml) moet genoeg zijn om een vingertop te bedekken (oefen vooraf hoe hard u moet knijpen)

5. Bewaren

Bewaar MenoRelax® gel bij kamertemperatuur. Bewaar op een veilige, droge plaats. Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum die bovenop de tube en op de verpakking vermeld staat.

6. Inhoud

- Een tube van 30 ml met MenoRelax® gel
- Gebruiksaanwijzing
- Applicator

Voorzorgsmaatregel:


Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Als u vragen hebt, of als u ergens over twijfelt, vraag dan uw arts of apotheker om advies. Raadpleeg bij aanhoudende of terugkerende klachten uw arts.

7. Contactgegevens

Vragen? Neem gerust contact met ons op: 088 777 0806



Distributeur:

TheOTCLab B.V.
Koninginneweg 152
1075 EE Amsterdam, Nederland

 BioClin B.V.
Delftechpark 55
2628 XJ Delft, Nederland

Neem voor alle vragen over het product contact op met de distributeur. Ga voor meer informatie over MenoRelax® gel naar www.menorelax.nl

MenoRelax® gel is een medisch hulpmiddel.

 0482 
07818891 / 16G1

