

OTRIVIN BABY MONODOSE

Steriele Isotone Zoutoplossing met 0.74% natriumchloride

Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing voor u Otrivin Baby Monodose gebruikt. Indien u nog vragen heeft, stel deze dan aan uw arts, apotheker of drogist.

Als een gevolg van opeenhoping van slijm, korstvorming en droogheid van het neusslijmvlies hebben baby's, kinderen en volwassenen soms moeite met ademhaling door de neus. Een overvloedige slijmproductie komt voornamelijk voor bij baby's en is een algemeen teken van een verstopte neus of een loopneus. Aangezien de baby zelf het neusslijm nog niet kan verwijderen door het neusje te snuiten, heeft hij – in deze situaties – moeite met ademen, eten en slapen en is hij daarom geïrriteerd en onrustig.

De neus reinigen met behulp van een zoutoplossing kan helpen om een verstopte neus te voorkomen en te verlichten en kan in sommige gevallen helpen om complicaties zoals sinusitis en oorontsteking te voorkomen. Vooral tijdens de vroege kinderjaren, dient deze reiniging gecombineerd worden met het wegzuigen van het slijm.

1. Wat is Otrivin Baby Monodose en waarvoor wordt het gebruikt?

Otrivin Baby Monodose is een steriele, isotone zoutoplossing zonder bewaarmiddelen. De zoutconcentratie is aangepast om neusirritatie te voorkomen. De oplossing bevat ricinusolie welke gekend is om zijn hydraterende en verzachtende eigenschappen.

Otrivin Baby Monodose wordt aanbevolen om:

- zachtjes de neusholten te reinigen wanneer deze verstopt zijn (vb. tijdens een verkoudheid) of bij allergische aandoeningen, door het wegwassen van het overtollige slijm of de allergische deeltjes zoals stof of stuifmeel.
- het geïrriteerde of droge neusslijmvlies te hydrateren als gevolg van een lage luchtvochtigheid (bv. als gevolg van verwarmde ruimtes, ruimtes met airconditioning, bij grote hoogte, vliegvluchten) of als gevolg van andere lichte neusirritaties.
- ingedikt neusslijm vloeibaar te maken, waardoor dit makkelijker te verwijderen is.

Otrivin Baby Monodose is geschikt voor de dagelijkse neusspoeling van baby's die nog niet in staat zijn hun neusje te snuiten.

De dagelijkse reiniging verdunt het neusslijm en helpt het overtollige slijm te verwijderen. Een te veel aan slijm kan het leven van je baby veranderen (slecht slapen, moeilijkheden om te eten). Het helpt hem om te ademen en zich weer beter te voelen.

Bij gebruik om het neusje van zuigelingen of baby's te reinigen in geval van overtollig slijm, dient Otrivin Baby Aspirator (medisch hulpmiddel, lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing) gebruikt te worden nadat de zoutoplossing werd ingedruppeld. Door het gelijktijdige gebruik van Otrivin Baby Aspirator samen met een zoutoplossing kan men het neusslijm gemakkelijker verwijderen. Zodoende vermindert men het risico op verdere complicaties zoals middenoorontsteking en rhinosinusitis. Het verbetert tevens de slaapkwaliteit van de baby tijdens een verkoudheid.

2. Voor u Otrivin Baby Monodose gebruikt

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de ingrediënten.

Gebruik geen gebroken of beschadigd flesje.

Geen bijzondere voorzorgsmaatregelen wanneer het gebruikt wordt waarvoor het bestemd is.

Omwille van zijn reinigende eigenschappen, kunt u Otrivin Baby Monodose het beste eerst gebruiken wanneer u ook een geneesmiddel via de neus moet innemen (v.b. bij verkoudheid of allergische rhinitis).

Otrivin Baby Monodose kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Dit product is enkel voor extern gebruik, niet injecteren.

3. Hoe gebruikt u Otrivin Baby Monodose?

Geschikt voor zuigelingen, kinderen en volwassenen. Het is aangeraden om medisch advies in te winnen alvorens het te gebruiken bij zuigelingen jonger dan 2 weken.

De gebruikelijke frequentie van toepassing is 2 tot 4 maal per dag per neusgat.

Was je handen alvorens de flacon te openen.

1. De neus snuiten indien nodig.
2. Maak 1 flesje los en verwijder het dopje.
3. Buig het hoofd achterover en breng het topje van het flesje in het neusgat.
4. Druk voorzichtig op het flesje om enkele druppels te krijgen en harder als een grondigere reiniging nodig is. Herhaal dit in het andere neusgat.
5. Wacht enkele seconden en snuit de neus indien nodig.
6. Bij gebruik om het neusje van zuigelingen of baby's te reinigen, die zelf hun neusje niet kunnen snuiten, dient een neusaspirator zoals Otrivin Baby Aspirator gebruikt te worden om het slijm te verwijderen.
7. Als u de overtollige oplossing later nog wilt gebruiken, sluit het flesje door het dopje terug op het flesje te duwen. De inhoud van het flesje dient echter binnen 12 uur na opening te worden gebruikt.

Om hygiënische redenen en om infecties te vermijden, mag elk flesje slechts door één en dezelfde persoon gebruikt worden.

4. Voor uw veiligheid

Onder normale gebruiksomstandigheden, zoals aangegeven, wordt Otrivin Baby Monodose zeer goed verdragen.

Indien u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, contacteer dan uw arts, apotheker of drogist.

5. Hoe bewaart u Otrivin Baby Monodose?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Niet gebruiken na de vervaldatum welke vermeldt staat op de verpakking en voor geopende flesjes: binnen 12 uur na eerste opening.

Bewaar op kamertemperatuur. Beschermen tegen hitte. Bewaar de flesjes in de originele verpakking.

6. Verdere informatie

Samenstelling: 0,74% natriumchloride, dinatriumfosfaat, natriumfosfaat, PEG-40 gehydrogeneerde ricinusolie (Cremophor RH40) en gezuiverd water.

Zonder bewaarmiddelen.

Otrivin Baby Monodose is beschikbaar in een verpakking van 18 flesjes van 5 ml.




Novartis Consumer Health S.A., Route de l'Etraz, CH – 1260 Nyon, Zwitserland.

Verdeler: Novartis Consumer Health B.V., Claudius Prinsenlaan 142, 4818 CP Breda, Nederland.

www.otrivinbaby.nl



 0459 medisch hulpmiddel

Datum: oktober 2012