

LEIDAPHARM ZWANGERSCHAPSTEST

Productinformatie

Voordat u de test uitvoert is het belangrijk deze bijsluiters goed te lezen.

Deze zwangerschapstest is eenvoudig met wat urine uit te voeren. U kunt binnen enkele minuten vaststellen of u zwanger bent of niet.

Deze zwangerschapstest is even betrouwbaar als de zwangerschapstest die door een huisarts of laboratorium wordt uitgevoerd. De betrouwbaarheid is ongeveer 99%.

Hoe werkt deze test?

Met de teststick kan de aanwezigheid van het zwangerschapshormoon hCG in de urine worden aangetoond. Dit hormoon komt alleen voor in uw urine als u zwanger bent. Uitzonderingsgevallen zijn het gebruik van bepaalde geneesmiddelen.

Vanaf wanneer is deze test te gebruiken?

De zwangerschapstest kan al worden gebruikt vanaf de eerste dag van de verwachte menstruatie. Het is niet noodzakelijk om ochtendurine te gebruiken voor deze test. De test is voor eenmalig gebruik.

Uitslag van de test


Voor een goede aflezing van het resultaat moet er altijd een roodkleurig bandje te zien zijn in het controlevenster. Indien dit niet het geval is dan is de test niet goed uitgevoerd. Zie ook de onderstaande tekening. Het wel of niet zwanger zijn kan worden afgelezen in het testvenster. Is in het midden van het testvenster een roodkleurig bandje aanwezig (hoe dun ook) dan bent u zwanger. Is alleen in het controlevenster een roodkleurig bandje aanwezig, dan bent u niet zwanger.

Opmerkingen

Wanneer de test aangeeft dat u zwanger bent dan raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts of de verloskundige in uw woonplaats. Medische begeleiding tijdens de zwangerschap is belangrijk voor de gezondheid van u en de baby.


Bewaarcondities

De ongeopende luchtdichte verpakking dient bewaard te worden tussen 5 en 25°C. Ongeopend is de zwangerschapstest houdbaar tot de op het doosje en het zakje aangegeven expiratedatum. Na openen van de luchtdichte verpakking de zwangerschapstest direct gebruiken.

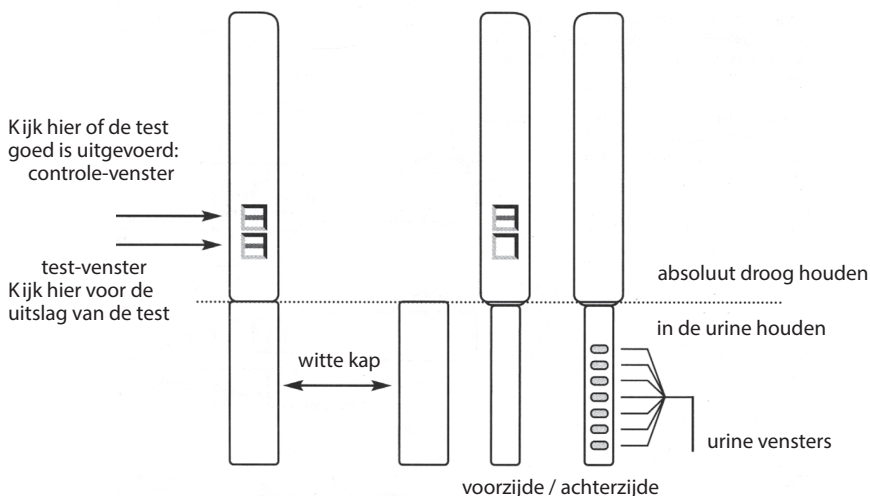


Instructies voor het gebruik


- 1.) Neem de luchtdichte verpakking met daarin de teststick uit het doosje. Maak de luchtdichte verpakking open (figuur 1) en neem de teststick eruit. Gebruik de test direct na het openen van de luchtdichte verpakking.

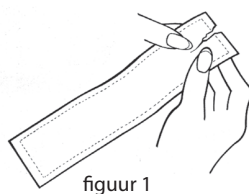


- 2.) Trek de kap van de teststick (figuur 2). Alleen het deel van de teststick dat door de kap bedekt was mag met de urine in aanraking komen. U kunt voor de verdere uitvoering van de test kiezen uit twee manieren.

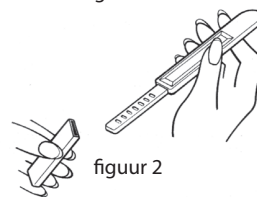

- 3a) U houdt de teststick gedurende 3 tot 5 seconden in de straal van uw urine (figuur 3a).

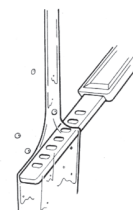


- 3b) U vangt wat van uw urine op in een bekertje en zet daar de teststick gedurende 3 tot 5 seconden in (figuur 3b).

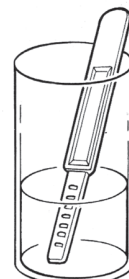

Het is belangrijk dat u zich houdt aan de aangegeven tijden voor het in de urine houden van de teststick. Het langer in de urine houden van de teststick kan het resultaat beïnvloeden. Er vormt zich dan geen enkele lijn.

- 4.) Doe de kap weer op de teststick (figuur 4) en leg deze plat neer met de vensters naar boven.

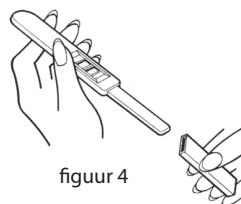


- 5.) Wacht 2 tot 5 minuten. In het controlevenster en soms ook in het testvenster ontstaat een roodkleurig bandje (figuur 5a en 5b).

figuur 5a



- 6.) Een roodkleurig bandje in het controlevenster geeft aan dat de test goed is uitgevoerd. Als er na 8 minuten nog geen roodkleurig bandje in dit venster ontstaat is de test niet goed verlopen.

figuur 5b

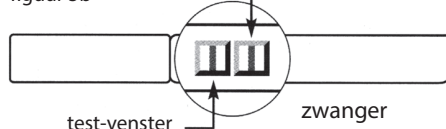

- 7.) Als er behalve een roodkleurig bandje in het controlevenster, ook een roodkleurig bandje in het testvenster ontstaat, bent u zwanger (figuur 5b).

Als ook bij herhaling van de test na enkele dagen de uitslag negatief is en de menstruatie toch uitblijft, raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts.

Voor vragen over deze zwangerschapstest kunt u terecht bij uw apotheek.

Voor informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Leidapharm BV
Zernikedreef 20
2333 CL Leiden
Nederland

Of u kunt telefonisch contact opnemen met (+31) 050 – 311 36 41

Deze tekst is voor het laatst herzien in: September 2012

06/12

Code:017757