

Inhoud Gluten-Check® verpakking:

- 1 Test cassette met pipet
- 1 Steriele automatische lancet
- 1 Opname buisje in houder
- 1 Alcohol desinfectie-doekje
- 1 Pleister
- 1 Buisje met verdunningsvloeistof
- 1 Gebruiksaanwijzing (2-talig: Nederlands en Frans)

Uitvoeren van Gluten-Check®:

De test is in enkele stappen eenvoudig uit te voeren en binnen enkele minuten heeft u de uitslag:

1. Met de automatische lancet (zeer dunne naald) kunt u snel en vrijwel pijnloos een druppel bloed verkrijgen:



2. Via het opname buisje wordt de druppel bloed opgenomen:



3. Samen met de meegeleverde oplossing vloeistof wordt het bloed toegevoegd aan de test en leest u in 5 minuten het resultaat af:



Gluten-Check® heeft een ingebouwde controle waardoor u zeker weet of de test goed is uitgevoerd.
U krijgt dan ook een helder en duidelijk antwoord op de vraag of u een Gluten Intolerantie (Coeliakie) heeft.