

Stap 1 slijm en korstjes verzachten, om ze makkelijker uit het neusje te halen.

Stap 2 het neusje zachtjes schoonmaken, waardoor je kindje weer vrij kan ademen.

Een baby kan zijn
of haar neusje
nog niet snuiten...



Je baby kan in het
eerste jaar tot wel *7 keer*
verkouden worden



Otrivin
Baby

 NOVARTIS Dit zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
KOAG 112-1113-2327 P3NL130204

Jouw baby's neusje

Baby's ademen tot ze ongeveer 6 maanden oud zijn voornamelijk door hun kleine en tere neusje. Een verstopt neusje maakt het ademen, eten en slapen voor je kindje daarom erg moeilijk.

Aangezien je baby nog niet zelf kan snuiten, is het belangrijk dat jij je kindje helpt. Speciaal hiervoor is de 2-staps Otrivin Baby methode ontwikkeld.



Stap 1

Het neusje voorbereiden



Zacht maken en verdunnen van overtollig slijm & korstjes:

- Otrivin Monodose zoutoplossing (kleine flesjes)
- Otrivin Baby Neusspray

Stap 2

Het neusje schoonmaken



Zachtjes leegmaken van het neusje:

- Otrivin Neusjesreiniger (+ 2 wegwerpdopjes)
- Navulverpakking met 8 wegwerpdopjes

Neusjesreiniger eenvoudig in gebruik!



1. Plaats het soepele dopje (A) op het apparaat (B).
2. Breng het mondstuk (C) in de mond en het neusdopje (A) in één van de neusgaten van de baby.
3. Zuig zachtjes het slijm uit het neusje, wat opgevangen wordt in het dopje met filter.
4. Indien nodig kan je, tussen 2 aspiraties in, het slijm in een zakdoekje doen door op het mondstuk te blazen.
5. Doe hetzelfde met het andere neusgat.
6. Verwijder het gebruikte neusdopje.