

# EYE FRESH

## Eye Fresh Alles-in-één vloeistof voor harde zuurstofdoorlatende contactlenzen 100 ml.

Eye Fresh is geschikt voor het reinigen, desinfecteren, bewaren en inzetten van in principe alle soorten harde zuurstofdoorlatende contactlenzen.

+ Meer details

Inhoud: 100 ml.

Productcode: UCGB100EF

### Gebruiksaanwijzing:

Was uw handen, spoel ze goed af en maak ze droog. Neem uw lens van het oog en leg deze in uw handpalm. Giet nu 5 - 10 druppels Eye Fresh op de lens en wrijf met uw wijsvinger de lens voorzichtig schoon. Spoel de lens grondig af met Eye Fresh. Plaats de lens vervolgens in de met verse Eye Fresh gevulde lenshouder. Voor een optimale desinfectie dienen de lenzen minimaal 6 uur in de gesloten lenshouder bewaard te worden. Na desinfectie kunt u de lenzen direct inzetten. Wanneer de lenzen gedurende een langere periode niet gebruikt worden, dient u ze in de Eye Fresh vloeistof te bewaren.

### Belangrijk:

Houd altijd dezelfde volgorde aan bij het inzetten en verwijderen van de lenzen om verwisseling te voorkomen. In geval van oogirritatie, staak het gebruik en raadpleeg een arts of contactlensspecialist. Na opening niet langer dan 90 dagen gebruiken. Bij kamertemperatuur (15 – 25° C) bewaren. Raak de opening van de flacon niet aan. Houd de lenshouder goed schoon. Buiten bereik van kinderen bewaren.

*Eye Fresh is door middel van filtratie gerealiseerd.*

## Productfoto



