



Lees voor gebruik deze informatie **aandachtig** door. Gooi deze **gebruiksaanwijzing** niet weg, deze bevat **belangrijke informatie**.

INHOUD GEBRUIKSAANWIJZING

1. GEBRUIK MIJ VOOR

2. HOE MIJ TE GEBRUIKEN

3. WEES VOORZICHTIG MET MIJ

4. MIJN INGREDIËNTEN

5. HOE BEWAAR JE MIJ

6. MIJN CONTACTGEGEVENS

1. GEBRUIK MIJ VOOR

Hoi! Ik ben MAX, Oorsmeerverwijderaar en samen gaan we dit doen! Ik ben ontworpen als een nijlpaard dat gemakkelijk overtollig oorsmeer wegspoelt met water en mijn zeepformulering die je oren weer schoon en hygiënisch maakt.

Oorsmeer of cerumen wordt door je lichaam geproduceerd en is een zelfreinigend middel. Het verzamelt vuil, bacteriën en andere viezigheid. Meestal werkt oorsmeer zich vanzelf uit de oren terwijl je kauwt of andere kaakbewegingen maakt.


Oorsmeer kan zich ophopen en je gehoor beïnvloeden. Als oorsmeer zo ver is opgebouwd, wordt het een oorprop genoemd.

Als je een oorprop hebt, kun je last krijgen van symptomen als:

- pijn in het oor waarin de oorprop zit
- druk of een piep in het oor
- verminderd gehoor in het oor waarin de oorprop zit
- een geur afkomstig van het oor waarin de oorprop zit
- duizeligheid
- kuchen

Gelukkig ben ik er om je te helpen! Ik ben gebaseerd op dezelfde techniek die door oorspecialisten wordt gebruikt.

Ik spoel je gehoorgang voorzichtig met water, verrijkt met zeep. Een eenvoudige methode voor het reinigen van oren. Ik ben een effectieve oplossing voor regelmatig thuis schoonmaken van de gehoorgangen. Net zoals tanden poetsen, zou ik een vast onderdeel van je persoonlijke gezondheid en hygiëne moeten zijn.

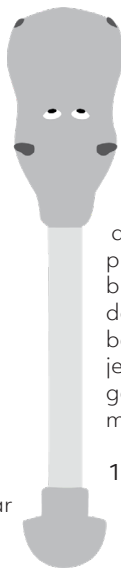

2. HOE MIJ TE GEBRUIKEN

Met slechts één applicatie om de twee dagen, zijn je oren schoon! Herhaal de procedure bij iedere applicatie drie keer. Mijn blauwe zeep is voldoende voor ongeveer 30 dagen. Vervang mij als mijn zeep op is. Het beste moment om mij te gebruiken is tijdens je douche- of badroutine. Heb je een gehoorapparaat? Geen probleem! Gebruik mij dan vlak voor het slapengaan.

1. Vullen: Knijp in mij om lauw water (max. 40°C) op te zuigen. Het water zal zich mengen met de zeep in mijn onderste compartiment. Gebruik je mij voor de eerste keer? Spoel mij dan drie keer om voordat je je oor met mij gaat spoelen.

2. Spoelen: Kantel je hoofd, plaats mijn tuit op de ingang van de gehoorgang en knijp. Laat de zeepoplossing de oorsmeer verzachten en kantel je hoofd naar achteren om je oor leeg te laten lopen.

3. Drogen: Als ik leeg ben, kun je mij gebruiken om zachtjes lucht in de gehoorgang te blazen tot deze droog is.



⚠ 3. WEES VOORZICHTIG MET MIJ

Het wordt niet aanbevolen om mij langer dan 30 opeenvolgende dagen te gebruiken. Neem contact op met uw arts als klachten verergeren. Laat mij niet door andere mensen gebruiken om kruisbesmetting te voorkomen.

Ik ben bedoeld voor toepassing bij kinderen, geholpen door een volwassene. Houd uit de buurt van kinderen jonger dan 3 jaar. Kleine onderdelen vormen een verstikkingsgevaar - buiten het bereik van kinderen houden.

Ik moet niet worden toegepast:

- Bij personen met bestaande beschadiging (bijv. perforatie) of vervorming van het trommelvlies.
- Bij personen met bestaande beschadiging aan de gehoorgang.
- Bij kinderen jonger dan 3 jaar.
- Bij kinderen met oorbuisjes.
- Bij kinderen met Otitis media of oorontsteking.
- Bij kinderen met pijnlijke oren.

Als je gehoorgangen geblokkeerd zijn raad ik aan een KNO-arts bezoeken. Nadat je oren professioneel zijn gereinigd door een specialist, adviseer ik ze regelmatig met mij door te spoelen om verdere ophoping van oorsmeer te voorkomen.

Allergieën

Stop mij te gebruiken bij een allergische reactie. Niet gebruiken als je allergisch bent voor een van de ingrediënten.

Bijwerkingen

Ik word goed getolereerd. Er zijn geen bijwerkingen bekend, als ik volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt wordt.

Wisselwerking met medicijnen

Er is geen negatief effect bekend tussen mij en medicijnen.

4. MIJN INGREDIËNTEN

Natrium tallowate, Glycerine, Aqua (water), Sorbitol, Sucrose, PEG-400, Tetranatrium.

5. HOE BEWAART U MIJ

Bewaren bij kamertemperatuur (10-25°C). Gebruik mij binnen 8 maanden na het eerste gebruik.

6. MIJN CONTACTGEGEVENS

Alle vragen over mij moeten worden gestuurd naar de distributeur. Voor meer informatie over mij, ga je naar www.kidsner.nl

Ik ben een medisch hulpmiddel, lees voor gebruik mijn gebruiksaanwijzing.

Fabrikant/Distributeur

 TheOTCLab

Paulus Potterstraat 20
1071 DA Amsterdam
Nederland
www.theotclab.com

Laatst gewijzigd: februari 2019

10ml



V9761803/19B1