

EVAGYNAL®



Istone oplossing voor gynaecologisch gebruik, pH 4,0

Samenstelling

Hydroxyethylcellulose	0,60 g
Melkzuur	0,20 g
Glycerol	2,00 g
Kaliumchloride	0,15 g
Natriumedetaat	0,10 g
Polyhexamethyleen biguanide hydrochloride (PHMB)	0,10 g
Gezuiverd water	q.s. tot 100 ml

Categorie

Medisch hulpmiddel

Werking

Het gebruik van EVAGYNAL® bevordert het herstel van de normale lichaamsfuncties, ook gedurende traumatische, farmacologische of medische behandelingen.

Het gebruik van EVAGYNAL® bevordert het herstel van de normale fysiologische gesteldheid van de vagina gedurende de behandeling van vaginale aandoeningen of na een medische ingreep.

Het product wordt geconserveerd met polyhexanide (PHMB), een kationisch surfactant dat zeer goed wordt verdragen door alle slijmvliezen.

Farmaceutische vorm

Oplossing in flacon van 100 ml.

Medische informatie

Toepassing

Behandeling van ontstekingen van de vulva, vagina en baarmoederhals, ongeacht aard en oorzaak, door middel van herstel en behoud van de fysiologische omstandigheden in de vagina.

Hulpmiddel bij re-epithelisatie na medische ingrepen (diathermische coagulatie, lasertherapie, cryotherapie) door een beschermende en barrièrevormende werking.

Contra-indicaties

Vastgestelde overgevoeligheid voor de bestanddelen.

Bijwerkingen

In sommige gevallen kan een overgevoeligheid (branderigheid of irritatie) optreden, wat verder geen gevolgen heeft en waarvoor de behandeling niet hoeft te worden aangepast.

Patiënten dienen echter melding te maken bij arts en apotheker van elke ongewenste bijwerking die vermoedelijk wordt veroorzaakt door het product.

Beïnvloeding van de rijvaardigheid of het bedienen van machines

Er zijn geen aanwijzingen dat het product de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen beïnvloedt.

Dosering en wijze van toedienen

Product voor eenmalig gebruik. Doorgaans is eenmaal toedienen voldoende. De behandeling kan op advies van een arts eventueel na 4 dagen worden herhaald.

Gebruiksaanwijzing

1. Verwijder het afsluitende garantiedopje door dit opzij te duwen.
2. Neem de canule uit het beschermende omhulsel en steek hem in de flacon totdat hij stevig blijft zitten.
3. Neem een geschikte liggende of zittende houding aan, zodat de oplossing goed kan worden ingebracht.
4. Breng de canule voorzichtig in de vagina, tot halverwege het uiteinde van de canule.
5. Knijp de flacon helemaal leeg. Houd de vloeistof enkele minuten in de vagina, zodat de oplossing haar werking kan doen. Volg ook eventuele instructies van uw behandelend arts op.



Waarschuwingen

Slechts één maal gebruiken en de verpakking voor eenmalig gebruik met resterende inhoud weggooiden. Gebruik (met name langdurig) van producten die plaatselijk worden toegepast kan leiden tot overgevoeligheid. In dat geval moet u de behandeling staken en contact opnemen met uw arts voor een passende behandeling. Het product mag alleen vaginaal worden toegediend. Tijdens de zwangerschap mag het product alleen worden gebruikt indien strikt noodzakelijk en onder medische begeleiding. Er zijn geen schadelijke effecten gerapporteerd bij overdosering, mits het product onder normale condities wordt gebruikt. Het product niet gebruiken wanneer u overgevoelig bent voor een of meerdere bestanddelen. Het product niet gebruiken na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum die op de verpakking is aangegeven. Het product niet gebruiken als de verpakking niet intact is. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet inslikken.

Speciale bewaarvoorschriften

Bewaren bij kamertemperatuur, op een koele en donkere plaats.

Verpakking

1 flacon van 100 ml met vaginaal canule

Vaginaal canule:

CE – fabrikant INGE Spa

Via Garibaldi 190

20024 S. Maria Rossa di Garbagnate Milanese

Milaan, Italië

Z-Index: 15792005

Artikelnr. 688.13001

Medisch hulpmiddel



Distributeur:

Memidis Pharma b.v.

Kerkenbos 1077-R

6546 BB Nijmegen, Nederland



Memidis
Pharma

Fabrikant:

Lo.Li. Pharma srl

Via dei Luxardo 33

00156 Rome, Italië



Deze gebruiksaanwijzing is voor de laatste keer herzien: 9-2-2015