

Otrivin Baby Wegwerpdopjes

Bevat 8 zachte wegwerpdopjes met absorberende filter om te gebruiken met de Otrivin Baby Aspirator – Neusjesreiniger voor baby's. Neusjesreiniger apart verkrijgbaar.

Lees aandachtig de instructies op de verpakking van dit product en op de verpakking van Otrivin Baby Aspirator alvorens dit product te gebruiken.

Neusaspiratie wordt aanbevolen telkens wanneer uw baby een verstopte neus heeft en dit zo vaak als nodig en vooral vóór de maaltijd van uw baby. Otrivin Baby Aspirator en Wegwerpdopjes werden ontworpen om te helpen het neusje van de baby te reinigen door storend neusslijm op een zachte manier te verwijderen. De neusdopjes in zacht materiaal werden ontwikkeld om perfect en veilig in het neusje van de baby gebruikt te worden. Elke wegwerpdop, individueel verpakt, bevat een absorberende filter om slijm te verzamelen, en dit proces is volledig hygiënisch.

Eenvoudig, veilig en hygiënisch in gebruik. Otrivin Baby Wegwerpdopjes worden gebruikt in combinatie met Otrivin Baby Aspirator en helpen uw baby te laten ademen, slapen, normaal te laten eten en zich weer beter te voelen.

Geschikt voor baby's, peuters en kinderen. Indien nodig, dient u bij baby's eerst medisch advies in te winnen.

Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid aan één van de medische hulpmiddelen.

Geen gebroken of beschadigd product gebruiken.

Voor hygiënische redenen en om besmetting te voorkomen, zijn de neusdopjes voor éénmalig gebruik. Na gebruik dienen deze verwijderd te worden.

Vraag uw apotheker indien u verdere vragen heeft over het gebruik van dit product.

Samenstelling: PVC and melamine schuim.

Bewaring:

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Beschermen tegen warmte.

Niet gebruiken na de vervaldatum die vermeld staat op de verpakking.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Wegwerpdopjes zijn beschikbaar in doosjes van 8 stuks.

Fabrikant: Novartis Consumer Health S.A., Route de l'Etraz, CH-1260, Nyon, Zwitserland

Verdeler: Novartis Consumer Health B.V., Claudius Prinsenlaan 142, CP 4818 Breda, Nederland

www.otrivinbaby.nl



{Use-by date expressed in YYYY-MM}



{Batch code}



Medisch hulpmiddel

Oktober 2012