


Sinusitis is een klasse I medisch hulpmiddel.

Nr. 427 - Spray

Inhoud 15 ml 

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing.



Voor meer informatie:
www.sinusitis.nu



Te gebruiken bij:
**Geïrriteerd en droog neusslijmvlies
zoals bij
verkoudheid en hooikoorts**

Sinusitis Neusspray is een klasse I medisch hulpmiddel voor de behandeling van een droog en geïrriteerd neusslijmvlies veroorzaakt door verkoudheid, droge lucht in vliegtuigen of in ruimtes met airconditioning. Sinusitis is ook te gebruiken bij het verzachten van een droog neusslijmvlies veroorzaakt door hooikoorts. De Sesam olie in Sinusitis werkt als een barrière om het uitdrogen van het neusslijmvlies tegen te gaan. Daarbij herstelt de spray de vochtbalans in de neusgang en werkt het verzachtend op harde stukjes in de neus. Sinusitis is mild in gebruik en kan langdurig gebruikt worden.

Ingrediënten

Sesam olie (*Sesamum orientale*), Tijm olie (*Thymus vulgaris*), Palm olie (*Elaeis guineensis*).

Wijze van gebruik

2 tot 3 keer goed sprayen in ieder neusgat. Om de te behandelen plaatsen goed te bereiken, is het noodzakelijk, na te hebben gesprayd, de vloeistof goed op te snuiven. De behandeling minimaal 2 tot 3 keer per dag herhalen.

Geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar.

Sinusitis Neusspray is mild in gebruik en kan langdurig gebruikt worden.

Allergie informatie

Dit product bevat sesam olie. Sinusitis niet gebruiken wanneer men overgevoelig is voor een van de bestanddelen.

Waarschuwing

Niet in de ogen sprayen.

Bewaring en houdbaarheid

Bewaar na het gebruik dit product droog, koel en donker en altijd buiten het bereik van kinderen! Vermijd bij het bewaren de invloed van direct zonlicht. De minimale houdbaarheidsdatum van dit preparaat staat vermeld op het doosje en etiket. Na openen 3 maanden houdbaar.

Fabrikant:

Bloem Health Products B.V.,
Postbus 225, 9670 AE Winschoten - Nederland.

Raadpleeg bij vragen over dit medische hulpmiddel uw apotheker of drogist, of stuur een mail naar: info@bloeminfo.nl

Voor meer informatie: www.sinusitis.nu

De tekst van deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien in juli 2015 door Bloem Health Products B.V.